

# PRODUKTDATABLAD

## BOSON SARS-COV-2 ANTIGEN HURTIGTEST



## COVID ANTIGENTEST FOR PERSONLIG OG PROFESJONELT BRUK

Ett-trinns in-vitro test basert på immunokromatografi. Testen er utviklet for rask kvalitativ bestemmelse av SARS-Cov-2 virusantigen i prøver tatt i nesebor (nese foran) på personer med mistanke om COVID-19 i løpet av de første syv dagene etter symptomdebut. SARS-CoV-2-antigen-hurtigprøve skal ikke brukes som eneste grunnlag for diagnostisering eller ekskludering av en SARS-CoV-2-infeksjon. Barn under 14 år bør assisteres av en voksen.

Det nylige oppdagede koronaviruset er et  $\beta$ -koronavirus. COVID-19 er en smittsom og akutt luftveissykdom. Folk er generelt mottakelige. Pasienter smittet med det nye koronaviruset er den største infeksjonskilden, der selv personer uten symptomer kan være en kilde til infeksjon. Nåværende epidemiologiske studier indikerer en inkubasjonsperiode på 1–14 dager, men hovedsakelig 3–7 dager. De viktigste symptomene inkluderer feber, tretthet, tap av luktesans og / eller smak og tørr hoste. I noen tilfeller er det også rapportert om symptomer som tetthet i nese, rennende nese, ondt i halsen, muskelsmerter og diaré.

## MEDIQ NORGE AS

Brynsveien 14, N-0667 Oslo | Postboks 6608, N-0607 Etterstad

Tlf: (+47) 67 02 43 00 - E-mail: kundeservice.no@mediq.com

www.mediqnorge.no



# PRODUKTDATABLAD

## BOSON SARS-COV-2 ANTIGEN HURTIGTEST



- CE godkjent produkt for selvtesting
- Norsk tekst og brukeranvisning
- Høy grad av brukervennlighet
- Avdekker og reduserer smitte
- Raskt svartid: 15-20 minutter
- Muliggjør testing i større skala

SARS-CoV-2-antigen-hurtigprøve har blitt sammenlignet i en studie med en laboratoriebekreftet klinisk diagnose av SARS-CoV-2-infeksjon. I studien ble 156 prøver testet med resultatene i henhold til tabellen nedenfor.

Sensitivitet	96,77 %
Spesifisitet	99,20 %
Nøyaktighet	98,72 %

### INKLUDERT I PAKKEN:

Testpatron for SARS-COV-2 antigen


Steril vattpinne

Prøverør

Buffer

Prøverørholder

Bruksanvisning

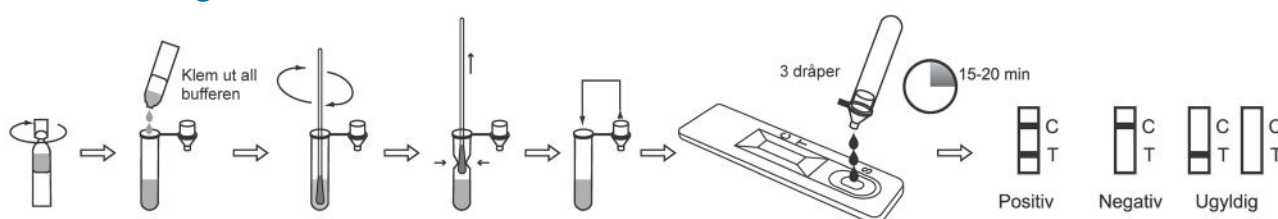

### MEDIQ NORGE AS

Brynsveien 14, N-0667 Oslo | Postboks 6608, N-0607 Etterstad

Tlf: (+47) 67 02 43 00 - E-mail: kundeservice.no@mediq.com

www.mediqnorge.no

